

**FIT**

INSOLE

**atlas**

SAFETY SHOES



**CUSTOMIZED  
FOR YOU**

# FIT

INSOLE

# PERFECT

# FIT

**atlas**  
SAFETY SHOES



## **IN NUR 4 MINUTEN ZU DEINER ANGEPASSTEN EINLEGESOHLE**

Jeder Fuß ist anders. Wie soll da eine einzige Einlegesohle optimal zu Tausenden von Fußgrößen und -formen passen? Die Antwort liefert ATLAS®: Mithilfe der flowmould-Technologie kann die FIT INSOLE Einlegesohle an dein einzigartiges Fußgewölbe individuell maßangepasst werden. Und das in weniger als 4 Minuten! Die FIT INSOLE ist die individuellste semiorthopädische Einlegesohle von ATLAS®. Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Orthopädie und gedacht für alle, die wissen, dass ein perfekt gebetteter Fuß den Unterschied macht. Die FIT INSOLE ist dein Unterstützer auf dem Weg zu einem gesünderen, komfortableren und kraftvolleren Arbeitstag!

Reviordoc

**DR. MED.  
MATTHIAS MANKE**

**ORTHOPÄDE UND AUTOR**

”

**SCHMERZEN LINDERN**

mit Einlegesohlen – das soll funktionieren? Absolut, wenn man bedenkt, dass viele Schmerzarten durch Überbeanspruchung oder Fehlnutzungen entstehen. Fußfehlstellungen beispielsweise können zu Gangstörungen führen und dadurch zu Gelenkschmerzen oder Muskelverspannungen – oft nicht nur am Fuß selbst, sondern auch an anderen indirekt betroffenen Körperstellen. Auf Dauer können diese chronisch werden, zu Arbeitsausfällen und im schlimmsten Fall Arbeitsunfähigkeit führen. Eine korrigierende Schuheinlage kann dem entgegenwirken.

”




**45%**

leiden unter Beschwerden ihres Bewegungsapparats.<sup>1</sup>

**25%**

der Arbeitsunfähigkeitstage lassen sich auf Muskel-Skelett-Erkrankungen zurückführen.<sup>2</sup>

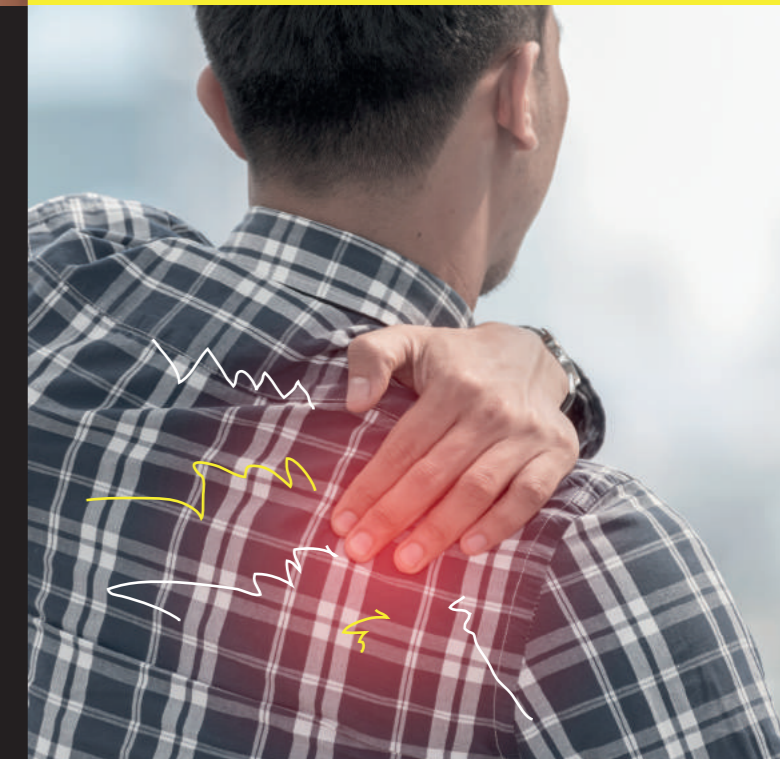

**70%**

leiden unter einer Fußfehlstellung.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> TK-Bewegungsstudie 2016

<sup>2</sup> Statista: Hauptkrankheitsarten für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland 2021

<sup>3</sup> Össur Deutschland GmbH: Die orthopädische Einlage bei Kniearthrose, Stand: Juli 2023

**FIT**  
INSOLE

# DIE FLOWMOULD- TECHNOLOGIE

## NEXT LEVEL FITTING.

Auf dem flowmould-Gerät spürst du förmlich, wie sich deine neuen Einlegesohlen an deine Füße, deine Statur und deinen Stand – kurzum: an dich ganz persönlich – anpassen. Schuhexpert:innen vor Ort helfen dir dabei, die richtigen Einstellungen zu wählen und führen dich in nur 4 Minuten durch alle Schritte bis du deine maßgeschneiderte ATLAS® FIT INSOLE in den Händen halten und dann in deine Schuhe stecken kannst.

ZUM CLIP



**atlas**  
SAFETY SHOES

4 MIN.

# SPEED



LENZ **atlas**  
SAFETY SHOES

**FIT**  
INSOLE

EASY WAY  
TO WALK  
BETTER

ZUM TUTORIAL



**atlas**  
SAFETY SHOES

## SO FUNKTIONIERT DIE FLOWMOULD-TECHNOLOGIE.

Die ATLAS® FIT INSOLE wird Schicht für Schicht von Hand vorgefertigt. Sechs Hightech-Bausteine werden zu einer Sohle verbunden und 3D-Forming sorgt für den höchsten Individualisierungsgrad: Auf dem flowmould-Gerät wird der Kern deiner Sohle erhitzt, an dein persönliches Fußgewölbe angepasst und gleich darauf wieder abgekühlt. Dadurch erhält die FIT INSOLE ihre einzigartige Form und ist dein persönlicher Footprint. Während der Anpassung kannst du jeden Arbeitsschritt live am Tablet mitverfolgen. Was entsteht, ist höchste Fitting-Präzision für deine individuelle Fußgeometrie bei minimalem Zeitaufwand dank Smart-Technology!



# SCHRITT FÜR SCHRITT

1



Zuerst ermitteln wir deine exakte Schuhgröße auf unserem STEP ON Scanner.

2



Wir schließen die ATLAS® FIT INSOLE an das flowmould-Gerät an und du kannst auf die Maschine steigen.

3



Zur idealen Ausrichtung wird ein Laser aktiviert. Dieser prüft deine Fußposition, deine Standbreite, und deine Kniestellung.

4



Als Nächstes wird die ATLAS® FIT Insole im Kern erhitzt. Das macht sie weich und flexibel.

5



Ein Gel-Kissen schmiegt die Sohle von unten an das Fußgewölbe an.


Dann wird das Gel-Kissen mit einer Kühlflüssigkeit gefüllt, wodurch die Sohle erhärtet und ihre neue, individuelle Form beibehält. In nicht mal 4 Minuten entsteht deine semi-orthopädische Einlegesohle – **customized for you**



6

**atlas**  
**SAFETY SHOES**

# PERFECT FIT

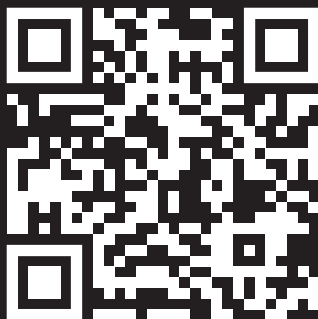

WEGBEREITER FÜR IHREN ERFOLG

**CARL NOLTE** **TECHNIK**

Carl Nolte Technik GmbH · Mergenthalerstr. 11 – 17 · 48268 Greven  
vertrieb@carlnolte.de · carlnolte-arbeitsschutz.de · Fon (02571)16-202 · nolteshop.de

[www.atlasschuhe.de/fit-insole](http://www.atlasschuhe.de/fit-insole)